



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
INSTITUTO ADOLFO LUTZ
CENTRO DE VIROLOGIA
NÚCLEO DE DOENÇAS SANGUÍNEAS E SEXUAIS
LABORATÓRIO DE HEPATITES
Tel: 3068-2911 - E-mail: labhepsp@gmail.com



São Paulo, agosto de 2017

INSTRUÇÕES DE COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA REALIZAÇÃO DA BIOLOGIA MOLECULAR DAS HEPATITES

GENOTIPAGEM DE VÍRUS DA HEPATITE B E RESISTÊNCIA AOS ANTIVIRAIS

TESTE

HEPATITE B – MUTAÇÃO DE RESISTÊNCIA À DROGAS

CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO

Os critérios para realização destes exames foram estabelecidos pelo Comitê Técnico Estadual de Hepatites, listados a seguir:

Uso de análogo nucleosídeo/nucleotídeo para o tratamento de Hepatite B há pelo menos 1 ano, aumento de 1 log da carga viral (HBVDNA) ou não negatificação da mesma e ter carga viral de no mínimo 2000UI/mL

COLETA

- Colher 2 tubos com EDTA (Tampa roxa) de 5mL
- Anotar na ficha de solicitação DATA, HORA e RESPONSÁVEL pela coleta
- As amostras deverão chegar ao Instituto Adolfo Lutz em, no máximo, 4 horas após a colheita, se mantido sob refrigeração.
- NÃO CONGELAR.

PREENCHIMENTO DAS FICHAS (OBRIGATÓRIO)

- ✓ Enviar junto com a ficha de solicitação de resistência, a **ficha de solicitação de carga viral do HBV** preenchida.
- ✓ Enviar o último resultado de carga viral do HBV, de no máximo 90 dias.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
INSTITUTO ADOLFO LUTZ
CENTRO DE VIROLOGIA
NÚCLEO DE DOENÇAS SANGUÍNEAS E SEXUAIS
LABORATÓRIO DE HEPATITES
Tel: 3068-2911 - E-mail: labhepsp@gmail.com



- ✓ Preencher TODOS os dados do paciente nas duas fichas
- ✓ Não abreviar nome do paciente
- ✓ DATA, HORA e RESPONSÁVEL pela coleta, nas duas fichas.
- ✓ Nome, CRM e assinatura do médico Autorizador e Solicitante, nas duas fichas.
- ✓ Encaminhar as Ficas de solicitação e as amostras para o laboratório.

CADASTRO DA SOLICITAÇÃO (OBRIGATÓRIO)

- Cadastrar e enviar (on line) a solicitação de resistência via GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial do Ministério da Saúde) – Somente serão aceitas amostras cadastradas pelo Serviço Solicitante via GAL, para garantir a retirada do resultado via Internet-GAL.

TRANSPORTE DA AMOSTRA

- Acondicionar as amostras em estante.
- Encaminhar para o laboratório, em caixa térmica rígida contendo gelo reciclável, não deixar os tubos em contato direto com o gelo.

LOCAL DE ENTREGA:

Instituto Adolfo Lutz

Núcleo de Gerenciamento de Amostras Biológicas - Coleta

Av Dr Arnaldo, 355

Cerqueira César

São Paulo

Tel: 3068-2925 / 3068-2876

Horário: Segunda a Sexta feira das 7:00 as 15:00 horas